

ODEŚLANIE ZESTAWU

Do zestawu pobraniowego został dołączony list przewozowy **ważny 30 dni od dnia zakupu**.

Pamiętaj, aby odesłać zestaw **najpóźniej następnego dnia** po pobraniu materiału. Wysyłka powinna nastąpić od poniedziałku do czwartku. Nie należy nadawać przesyłki przed dniami świątecznymi.


Zapakuj pudełko w załączony foliopak z etykietą zwrotną UPS. Zadzwoń pod numer firmy kurierskiej UPS (czynny pon.-pt., 8.00–16.00): **+48 22 489 48 77** i zamów odbiór przesyłki.

Przed rozmową przygotuj numer przesyłki zwrotnej, który znajduje się na etykiecie zwrotnej dołączonej do zestawu.
Przesyłka jest już opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odnoszenia przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

ODBIÓR WYNIKÓW

Zatrzymaj swój kod badania!

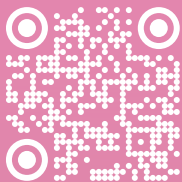


Tutaj odbierzesz wynik

Wynik online można odebrać na stronie <https://www.alab.pl/wyniki>

1 Podaj PESEL lub datę urodzenia

2 Wpisz kod kreskowy badania

3 Kliknij „Pobierz wyniki badań”

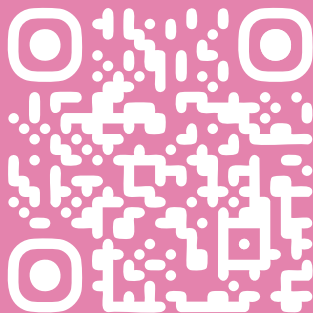

www.alab.pl

Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych



ALAB *laboratoria*

 **ALAB** *laboratoria*

INSTRUKCJA

ZESTAW DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

PRZEZNACZONY DLA KOBIEĆ

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
MOCZOWO-PŁCIOWYCH



Zestaw do samodzielnego pobierania materiału do badań molekularnych w diagnostyce zakażeń układu moczowo – płciowego

INSTRUKCJA POBRANIA

WAŻNE! Nieprawidłowe pobranie materiału może mieć wpływ na jakość lub brak wyniku.

Naklej na osłonkę wymazówki dołączony do zestawu kod kreskowy. Pozostałe naklejki z kodem pozostaw luzem w pudełku.

Pobranie powinno nastąpić od poniedziałku do środy, a następnie odesłać do laboratorium następnego dnia.

SKŁAD ZESTAWU:

- szczoteczka Evalyn® Brush
- torebka foliowa
- kody kreskowe do naklejania na zlecenie i zestaw pobraniowy (osłonkę wymazówki)
- oświadczenie i potwierdzenie danych pacjenta
- instrukcja pobrania
- zwrotny foliopak i etykieta wysyłkowa




UWAGI PRZED POBRANIEM


- Zestaw wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Ułóż wszystkie elementy zestawu na czystej powierzchni i przed użyciem **sprawdź**, czy zestaw jest kompletny.
- W przypadku braku elementów w zestawie lub ich uszkodzenia, skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu: **22 349 11 94**. Niekompletny zestaw nie nadaje się do użytku.
- Nie używaj podczas menstruacji.
- Nie stosuj w trakcie ciąży ani w okresie trzech miesięcy po porodzie.
- Nie używaj żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem wymazówki Evalyn® Brush. (Można normalnie używać dopochwowych środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody).
- **Wypełnij i podpisz zlecenie wykonania badania.**
- W przypadku osoby niepełnoletniej, zlecenie podpisuje opiekun prawny.



Przed użyciem umyj ręce.

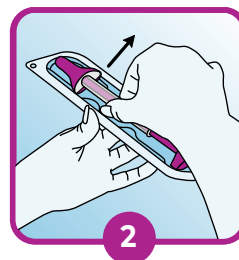


Wyjmij szczoteczkę Evalyn® Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn® Brush do laboratorium po użyciu.

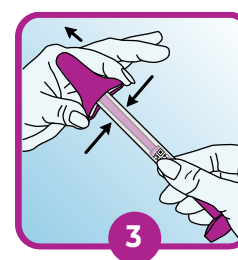


Ściśnij boki różowej osłonki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn® Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn® Brush!




Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie, jak np. do wkładania tamponu).

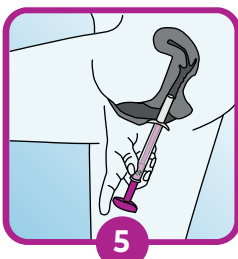


Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę Evalyn® Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

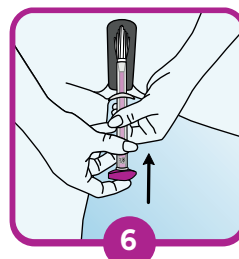


Przytrzymuj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą przciśnij ostrożnie różowy uchwyt, aż do jego zetknięcia z obudową. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu, z prawidłowo dociśniętym różowym uchwytem, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

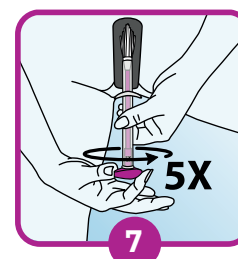

Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w dowolnym, ale tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę Evalyn® Brush.

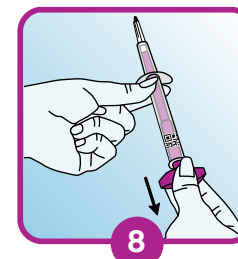


Przytrzymuj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn® Brush powyżej skrzydełek.

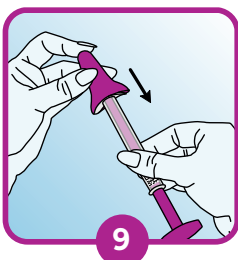


Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Za pomocą kciuka i palca wskazującego ponownie nałóż różową osłonkę. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.



Naklej na osłonkę wymazówki dołączony do zestawu kod kreskowy. Umieść szczoteczkę Evalyn® Brush z powrotem w opakowaniu.

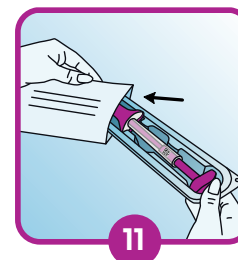

Umieść opakowanie zawierające szczoteczkę Evalyn® Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę. Naklej kod kreskowy na oświadczeniu. Zapakuj opakowanie ze szczoteczką Evalyn® Brush do pudełka wraz z pozostałym kodem.

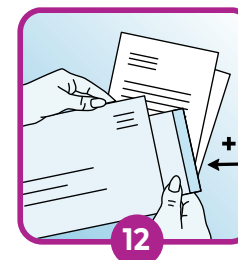

Użyj foliopaku zwrotnego w celu wysłania pudełka zawierającego szczoteczkę Evalyn® Brush oraz kod kreskowy i oświadczenie.

