

Odsyłając zestaw, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Opcja 1. Paczkomat® InPost

Po zakupie badania w sklepie alab.pl wybierając opcję „paczkomat” otrzymasz kod umożliwiający nadanie zwrotne przesyłki w Paczkomacie® InPost wraz z terminem, po którego upływie kod utraci ważność (45 dni od otrzymania kodu). Informację otrzymasz e-mailem w ciągu 2 dni roboczych od InPost.

Przygotowanie przesyłki:

- przygotowane pudełko transportowe włóż do foliopaku i dokładnie zamknij,
- na opakowaniu przesyłki zapisz kod otrzymany e-mailem od InPost.

Nadanie przesyłki w Paczkomacie® InPost:

- na ekranie urządzenia wybierz opcję „Nadaj paczkę”,
- wpisz kod otrzymany e-mailem od InPost,
- włóż przesyłkę do skrytki i zamknij drzwiczki.

Opcja 2. Kurier InPost

W zestawie do pobrania badania, który otrzymasz znajduje się etykieta zwrotna (ważna 60 dni od dnia zakupu) oraz foliopak.

Przygotowanie przesyłki:

- przygotowane pudełko transportowe włóż do foliopaku i dokładnie zamknij;
- naklej etykietę zwrotną na foliopak;
- aby zlecić odbiór przesyłki przez kuriera InPost, wyślij e-mail na adres przesylki@alab.com.pl z danymi niezbędnymi do zamówienia kuriera:
 - adres odbioru,
 - imię i nazwisko,
 - numer telefonu kontaktowego,
 - data i godzina odbioru,
 - numer zamówienia (znajdziesz go w mailu potwierdzającym zakup badania),
 - informacja o tym, że jest to badanie wysyłkowe.
- mailowo otrzymasz potwierdzenie zamówienia kuriera InPost z adresu przesylki@alab.com.pl;
- przekaz kurierowi przesyłkę w umówionym terminie.

Opcja 3. Kurier UPS

Do zestawu pobraniowego został dołączony list przewozowy ważny 30 dni od dnia zakupu.

Pamiętaj, aby odesłać zestaw niezwłocznie po pobraniu materiału.


Przygotowanie przesyłki:

- przygotowane pudełko transportowe włóż do foliopaku i dokładnie zamknij,
- zapakuj pudełko w załączoną kopertę z etykietą zwrotną UPS,
- zadzwoń na infolinię UPS +48 22 534 00 00 i zamów Kuriera po odbiór przesyłki.

Przesyłka zostanie automatycznie wysłana do laboratorium.

Odbiór wyników:


Zatrzymaj kartonik z kodem badania!

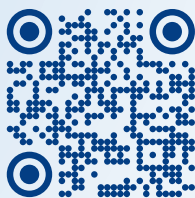

↑ Tutaj odbierzesz wynik

Wynik online można odebrać na stronie www.alab.pl/wyniki

Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami: cs@alab.com.pl

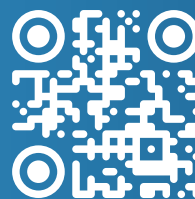

www.alab.pl



ALAB *laboratoria*

Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych



INSTRUKCJA

Instrukcja opisuje sposób samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego w postaci wymazu z jamy ustnej (ze śluzówki policzka) do badań genetycznych.

Skład zestawu:

- instrukcja samodzielnego pobrania materiału do badania,
- skierowanie na badanie genetyczne oraz deklaracja świadomej zgody,
- 2 wymazówki,
- torebka foliowo-papierowa (do zapakowania wymazówek),
- zestaw kodów kreskowych do naklejenia,
- kartonik z kodem badania do odbioru wyniku,
- zwrotny foliopak,
- pudełko transportowe.

UWAGI PRZED POBRANIEM:

Co najmniej 1 godzinę przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków ani płynów (z wyjątkiem wody), palić papierosów, przyjmować leków ani myć zębów. W jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych (gum do żucia, cukierków, lizaków i innych).

! **Nieprawidłowe pobranie materiału może wpłynąć na jakość wyniku lub uniemożliwić jego uzyskanie.**

Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku dla jednej osoby.

Przed użyciem sprawdź, czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony.


Nie używaj zestawu ani wymazówek po upływie terminu ważności.

Wypełnij skierowanie i deklarację świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego. Zapoznaj się z treścią oświadczeń i podpisz oba dokumenty. Pamiętaj o wpisaniu na skierowaniu nazwy i symbolu zlecanego badania. W wyznaczonym miejscu na skierowaniu naklej jeden, dowolny kod z dołączonego zestawu.

! **Brak prawidłowo wypełnionego skierowania i deklaracji świadomej zgody lub brak wymaganych podpisów uniemożliwia wykonanie badania.**


POBRANIE I ZABEZPIECZENIE WYMAZU Z JAMY USTNEJ:

1

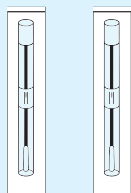


Przygotuj 2 wymazówki.

2

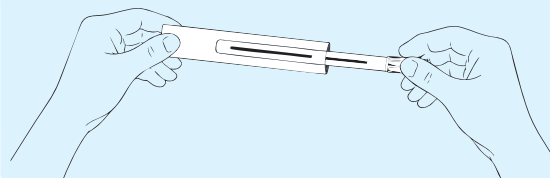


Wyjmij pierwszą wymazówkę z opakowania. Naklej na nią jeden, dowolny kod kreskowy z zestawu oraz opisz imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobierany jest wymaz.

3

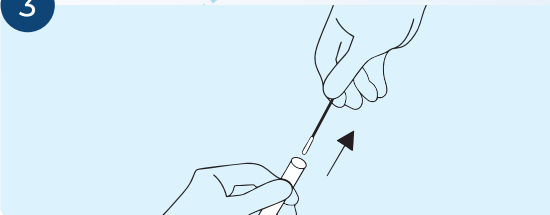


Wyjmij wymazówkę z plastikowej tulei, trzymając ją za część bez bawełnianego wacika. Od tego momentu uważaj, aby końcówka z wacikiem nie dotykała żadnej powierzchni poza jamą ustną pacjenta.

4

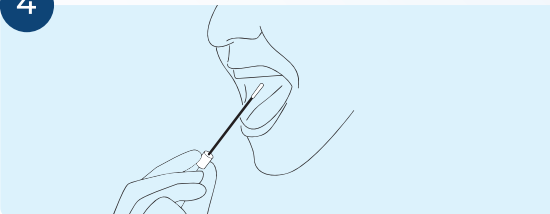

Pobierz wymaz, energicznie pocierając wacikiem wymazówki wewnętrzną stroną obu policzków przez ok. 20 sekund, wykonując ruchy obrotowe.

5

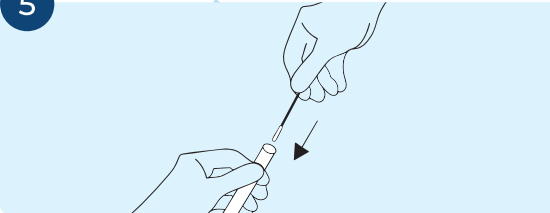


Umieść wymazówkę z powrotem w tulei, unikając kontaktu końcówki z jakąkolwiek inną powierzchnią, a następnie dokładnie dociśnij tuleję.

6


Powtórz cały proces z drugą wymazówką.

7

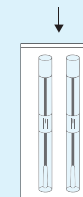

Po pobraniu materiału umieść obie wymazówki w dołączonej do zestawu torebce foliowo-papierowej i zamknij ją.

8

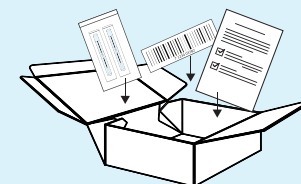

Torebkę z wymazówkami, dokładnie wypełnioną i podpisane dokumenty oraz pozostałe kody kreskowe włóż do pudełka transportowego.

ODEŚLANIE ZESTAWU:

Zestaw należy odesłać niezwłocznie po pobraniu materiału. Do czasu wysyłki materiał należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Zaleca się nadanie przesyłki w dniu pobrania materiału (kurierem lub poprzez Paczkomat® InPost).

Przy zakupie badania wybrałeś jedną z trzech opcji dostawy: paczkomat® InPost, kurier InPost, oraz kurier UPS.

Materiał odsyłasz taką samą drogą, jaką przyszło zamówienie, czyli:

1. Paczkomat InPost® (dostawa) - paczkomat® InPost (zwrot).
2. Kurier InPost (dostawa) - kurier InPost (zwrot).
3. Kurier UPS (dostawa) - kurier UPS (zwrot).