


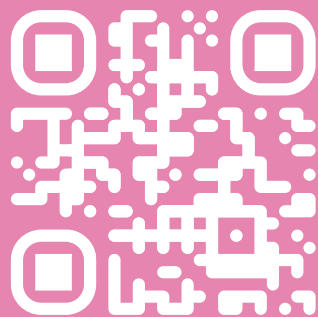

www.alab.pl

Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Analiz Medycznych



 **ALAB** *laboratoria*

ODEŚLANIE ZESTAWU:

Pamiętaj, aby odesłać zestaw niezwłocznie po pobraniu materiału. Badanie należy zaplanować tak, aby wykonać je i nadać przesyłkę od poniedziałku do środy.

Przy zakupie badania wybrałaś jedną z dwóch opcji dostawy: kurier lub Paczkomat® InPost. Odsyłając zestaw, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.



Opcja 1. Kurier Inpost

W zestawie do pobrania badania, który otrzymasz znajduje się etykieta zwrotna (ważna 14 dni od dnia zakupu) oraz foliopak.

Przygotowanie przesyłki:

- Umieść pobrany materiał wraz z kodem kreskowym w pudełku,
- Pudełko włóż do foliopaku i dokładnie zamknij,
- Aby zlecić odbiór przesyłki przez kuriera InPost, wyślij e-mail na adres przesyłki@alab.com.pl z danymi niezbędnymi do zamówienia kuriera:
 - adres odbioru,
 - imię i nazwisko,
 - numer telefonu kontaktowego,
 - data i godzina odbioru.
- Mailowo otrzymasz potwierdzenie zamówienia kuriera z adresu przesyłki@alab.com.pl,
- Przekaż kurierowi przesyłkę w umówionym terminie.

Opcja 2. Paczkomat® InPost

Po zakupie badania w sklepie alab.pl wybierając opcję „paczkomat” otrzymasz kod umożliwiający nadanie zwrotne przesyłki w Paczkomacie® InPost wraz z terminem, po którego upływie kod utraci ważność. Informacje otrzymasz SMS-em i e-mailem w ciągu 2 dni roboczych od SzybkieZwroty.pl.

Przygotowanie przesyłki:

- Umieść pobrany materiał wraz z kodem kreskowym w pudełku.
- Pudełko włóż do foliopaku i dokładnie zamknij.
- Na opakowaniu przesyłki zapisz kod otrzymany SMS-em od SzybkieZwroty.pl.

Nadanie przesyłki w Paczkomacie® InPost:

- Na ekranie urządzenia wybierz opcję „Nadaj paczkę”.
- Wpisz kod otrzymany SMS-em od SzybkieZwroty.pl.
- Włóż przesyłkę do skrytki i zamknij drzwiczki.

Przesyłka zostanie automatycznie wysłana do laboratorium.

 **ALAB** *laboratoria*

INSTRUKCJA

ZESTAW DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

PRZEZNACZONY DLA KOBIET
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
MOCZOWO-PŁCIOWYCH



Otrzymałaś zestaw do samodzielnego pobrania materiału w kierunku zakażeń układu moczowo-płciowego. Dzięki niemu możesz wykonać badanie w wygodny i dyskretny sposób, w zaciszu własnego domu.

Badanie umożliwia wykrycie drobnoustrojów odpowiedzialnych za infekcje intymne i/lub wirusa HPV, który może prowadzić do rozwoju zmian nowotworowych.

Przeczytaj dokładnie instrukcję i wykonaj badanie zgodnie z opisanymi krokami, aby zapewnić wiarygodny wynik.

SKŁAD ZESTAWU:

- szczoteczka Evalyn® Brush,
- torebka foliowa,
- kody kreskowe do naklejenia na oświadczeniu i zestawie pobraniowym (osłonce wymazówki),
- oświadczenie i potwierdzenie danych pacjenta,
- instrukcja pobrania,
- zwrotny foliopak i etykieta wysyłkowa.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

- Nie używaj podczas menstruacji,
- Nie stosuj w trakcie ciąży ani w okresie trzech miesięcy po porodzie,
- Nie używaj żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem wymazówki Evalyn® Brush,
- Na 2–3 dni przed pobraniem materiału należy wstrzymać się od stosunków płciowych.

UWAGI PRZED POBRANIEM:

- Zestaw wyłącznie do jednorazowego użytku,
- Ułóż wszystkie elementy zestawu na czystej powierzchni i przed użyciem **sprawdź**, czy zestaw jest kompletny,
- W przypadku braku elementów w zestawie lub ich uszkodzenia, skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu: **22 349 11 94**. Niekompletny zestaw nie nadaje się do użytku,
- **Wypełnij i podpisz oświadczenie na wykonania badania**,
- W przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie podpisuje opiekun prawny.

WAŻNE!


Nieprawidłowe pobranie materiału może mieć wpływ na jakość lub brak wyniku.

Naklej na osłonkę wymazówki oraz na oświadczeniu dołączone do zestawu kody kreskowe. Pozostałe naklejki z kodem pozostaw luzem w pudełku.


INSTRUKCJA POBRANIA



1 Przed użyciem umyj ręce.

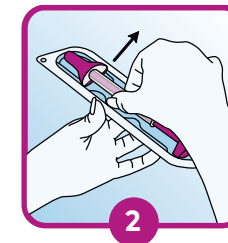


2 Wyjmij szczoteczke Evalyn® Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn® Brush do laboratorium po użyciu.

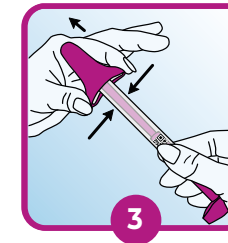


3 Ściśnij boki różowej osłonki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn® Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn® Brush!




4 Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie, jak np. do wkładania tamponu).

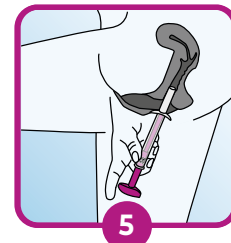


5 Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczke Evalyn® Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

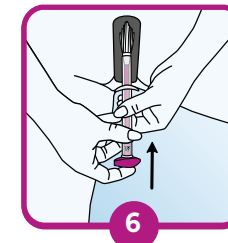


6 Przytrzymuj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą przyciśnij ostrożnie różowy uchwyt, aż do jego zetknięcia z obudową. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu, z prawidłowo dociśniętym różowym uchwytem, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

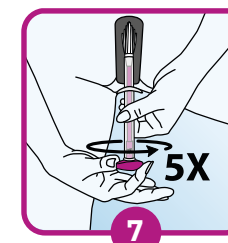

7 Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w dowolnym, ale tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczke Evalyn® Brush.

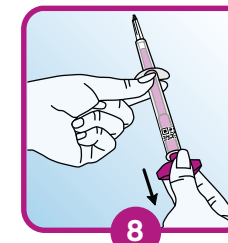


8 Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn® Brush powyżej skrzydełek.

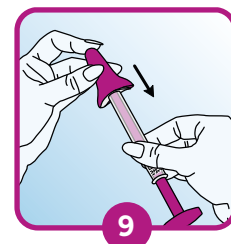

9 Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Za pomocą kciuka i palca wskazującego ponownie nałóż różową osłonkę. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.



10 Naklej na osłonkę wymazówki dołączony do zestawu kod kreskowy. Umieść szczoteczke Evalyn® Brush z powrotem w opakowaniu.

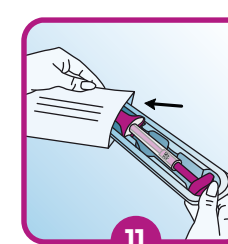

11 Umieść opakowanie zawierające szczoteczke Evalyn® Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę. Naklej kod kreskowy na oświadczeniu. Zapakuj opakowanie ze szczoteczka Evalyn® Brush do pudełka wraz z pozostałym kodem.



12 Użyj foliopaku zwrotnego w celu wysłania pudełka zawierającego szczoteczke Evalyn® Brush oraz kod kreskowy i oświadczenie.